



## **MASQUE BARRIERE LAVABLE UNS 1**

### **RUKO**

**Norme AFNOR SPEC S76-001 : 2020**

**Masque de catégorie 1 : UNS1**

**Efficacité de filtration des particules de 3 $\mu$ m : 99,7%**

**Efficacité de filtration des particules de 1 $\mu$ m : 99,3%**

**Barrette nasale-100% Polypropylène-extensible**

**Lavable 50 fois**

La société NORDFILM et la société RUKO se sont associées pour proposer un masque lavable de qualité qui répond aux normes françaises AFNOR Spec S76-001 : 2020.

**Ce masque a fait l'objet d'un rapport d'essais du ministère des armées référence « RP/20-2415/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1 » repris en annexe.**

**Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire lié au COVID-19.**

**Ce masque est classé UNS1 (masque destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public), suivant la note d'information interministériel du 29 mars 2020 :**

[https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques\\_reservees\\_a\\_des\\_usages\\_non\\_sanitaires.pdf](https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques_reservees_a_des_usages_non_sanitaires.pdf)

Ce masque est fabriqué en Europe.

Notre capacité de production est de 1.400.000 masques par semaine.

La création, le développement, la fabrication du masque ont été réalisés par la société RUKO, installée à la Bassée (59480 – France).

Les clichés d'impression ont été réalisés par la société MILLER GRAPHICS, située à Roeselare (8800 – Belgique).

La DAO, l'extrusion, l'impression et le conditionnement des masques ont été réalisés par nos soins, sur nos sites de NORDFILM EXTRUSION basé à Pont Audemer (27500 – France) et de NORDFILM IMPRESSION basé à Ruitz (62620 – France).

### **Domaine d'application**

Ce masque barrière est destiné à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d'infection virale.

Il faut changer votre masque toutes les 4h00 et lorsqu'il est humidifié, déformé, endommagé ou ne tient plus correctement sur votre visage.

Ce dispositif peut contribuer à la protection de l'ensemble d'un groupe portant ce masque barrière.

Seule la protection limitée contre le virus « covid-19 » est revendiquée.

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection de protection individuel au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).



### Notice d'utilisation

Vous devez vous laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique avant de manipuler le masque.

Assurez-vous que le masque soit en excellent état (pas de trou, déchirure, dégradation...).

Placez le masque au niveau de votre bouche en tenant celui-ci par les lanières élastiques.

Mettez les lanières élastiques derrière les oreilles.

Ajustez la barrette nasale du masque de sorte à recouvrir correctement le nez.

Ajustez le masque de sorte que votre nez, votre bouche, votre menton soient recouverts.

Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue (c'est-à-dire sans présence de cheveux au contact avec la peau de l'utilisateur et pour certaines personnes, une peau rasée).

Pour une réutilisation du masque, s'assurer que le masque ait été nettoyé conformément aux préconisations.

Pour ne pas être contaminé lors du retrait d'un masque barrière, il doit être retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé.

Pour cela, il est recommandé de :

Le cas échéant, il est nécessaire au préalable de retirer ses gants de protection.

Se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.

### Entretien et stockage du masque

Lavage en machine à 60° avec détergent classique, 30 minutes minimum.

Conçu pour être réutilisé et lavé 50 fois.

Séchage en tambour dans les 2 heures après lavage.



## Avertissement

Ce masque n'est en aucun cas destiné au personnel médical et soignant.

Ce masque ne remplace en aucun cas les gestes barrières et n'exonère pas l'utilisateur de l'application des

consignes sanitaires présentées sur le site du gouvernement français :

<https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus>.

### Les gestes barrières à adopter



Lavez-vous très **régulièrement** les mains



Utilisez un mouchoir à usage **unique** et jetez-le




Toussez ou éternuez dans **votre coude** ou dans **un mouchoir**



Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades

### La distance sociale préconisée

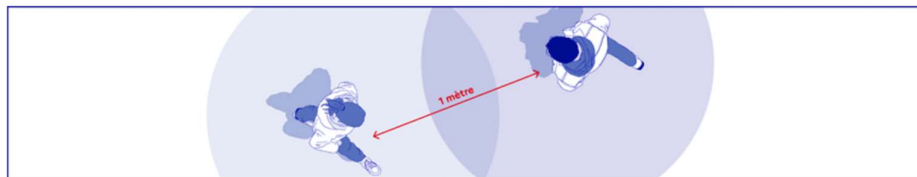

Pour tenir la maladie à distance, **restez à plus d'un mètre de distance** les uns des autres

### Durée d'utilisation

Le masque barrière doit être lavé à chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage.

Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou le menton pendant et après l'utilisation.

Durant une même période de 4h00, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement pour offrir aucun contact.

**Annexe**

- Rapport d'essais du ministère des armées